

Sveriges mest använda Helicobacter Pylori-test



Prova
gratis!

~~KYLLÅD~~

Förvaras i rumstemperatur (0 - 42°C)

SMP+ Cardio

HelicotecUT® Plus visar ureasaktivitet av *Helicobacter pylori* via gastrisk biopsi.

Lätt att använda



Öppna klister-etiketten på testkortet



Placera 2 - 3 biopsier på test-papperet med hjälp av den medföljande applikatorn









Återförslut och pressa klister-etiketten över testpapperet för att klämma vätska ur biopsierna



Notera datum och tid för provtagningen samt patient-information på etiketten

Resultat inom 5 - 60 minuter

Reaktionstid	5 min	30 min	60 min	60 min	60 min	60 min
Färg på ytterring						
Testresultat	++++	++++	+++	++	+	-

Kliniska resultat

HelicotecUT® Plus

	1*	2*
Sensitivitet	98,5%	100%
Specificitet	92,5%	100%
Snabbaste positiva resultat	5 minuter	
Sluttid	60 minuter	

1* Kaohsiung Medical University Hospital.

2* Taipei Medical University Hospital.

Fördelar

- ✚ Hög sensitivitet och specificitet
- ✚ Tydligt, snabbt och korrekt resultat
- ✚ Överlägsen pålitlighet och lång hållbarhet
- ✚ Lätt att använda och lätt att förvara
- ✚ Biopsi-applikator medföljer i förpackningen

Art. Nr. HUP01

50 st per kartong

Kan förvaras 30 månader i rumstemperatur (0 - 42°C)

QM-certifierat: DIN EN ISO 13485



Strong Biotech Corporation

Beställ gratis prover:

031-68 10 55

info@smpcardio.se

www.smpcardio.se

SMP+ Cardio