

Helicobacter Pylori-test



KYLLKÅP

Förvaras i rumstemperatur (0 - 42°C)

HelicotecUT® Plus visar ureasaktivitet av Helicobacter pylori via gastrisk biopsi.

Lätt att använda



Öppna klisteretiketten på testkortet



Placera 2 - 3 biopsier på testpapperet med hjälp av den medföljande applikatorn



Återförslut och pressa klisteretiketten över testpapperet för att klämma vätska ur biopsierna



Notera datum och tidpunkt för provtagningen samt patientinformation på etiketten

Resultat inom 5 - 60 minuter

Reaktionstid	5 minuter	30 minuter	30 minuter	60 minuter	60 minuter	60 minuter
Färg på yttering						
Testresultat	++++	++++	+++	++	+	-

Kliniska resultat

HelicotecUT® Plus	1*	2*
Sensitivitet	98,5%	100%
Specificitet	92,5%	100%
Snabbaste positiva resultat		5 minuter
Sluttid		60 minuter

1* Kaohsiung Medical University Hospital . 2* Taipei medical University Hospital.

Fördelar

- ✚ Hög sensitivitet och specificitet
- ✚ Tydligt, snabbt och korrekt resultat
- ✚ Överlägsen pålitlighet och lång hållbarhet
- ✚ Lätt att använda och lätt att förvara
- ✚ Biopsi-applikator medföljer i förpackningen

Art. Nr. HUP01
50 st per kartong
Kan förvaras 30 månader i rumstemperatur (0 - 42°C)

QM-certifierat: DIN EN ISO 13485

Strong Biotech Corporation

SMP+ Cardio