

# Premofix® Sunmed Radiseal tryckbandage

## Premofix® Sunmed Radiseal, transparent tryckbandage för eftervård av punktionshål i radialis

- ✚ Enkel och snabb applicering med kardborreband
- ✚ Integrerad, transparent kompressionskudde
- ✚ Medföljande injektionsventil och spruta för fyllning av den transparenta kompressionskudden
- ✚ För både höger -och vänsterapplicering



## Bruksanvisning

1. Efter kateterisering, dra tillbaka introducer-skidan 2 –3 cm
2. Rikta in den blå markeringen på kompressionsballongen (large), proximalt till punktionsstället och fäst kardborrebandet runt handleden. Se till att kardborrebandet sitter stabilt och rakt.
3. Använd den medföljande sprutan till att injicera rätt mängd luft i kompressionsballongen.  
Normal luftvolym: 13 ml. Maximal luftvolym: 18 ml
4. Ta bort introducer-skidan och kontrollera att det inte blöder. Om blödning observeras, injicera mer luft (ej mer än 18 ml) tills det slutar.
5. Kontrollera hemostas-utvecklingen och justera lufttrycket med den medföljande sprutan.

Kontrollera att blödningen helt upphört innan Radiseal avlägsnas.

OBS: Luftinjektionsvolym och kompressionstid kan variera beroende på patientens tillstånd, heparinvolym och storlek på punktionsstället. Kontrollera punktionsstället och justera efter behov.

## Premofix® Sunmed Radiseal S

Transparent tryckbandage för punkterade radialisartärer. Längd 23,5 cm  
För engångsbruk.  
Art nr: SM-TB-S-TP  
20 st per kartong

## Premofix® Sunmed Radiseal L

Transparent tryckbandage för punkterade radialisartärer. Längd 29 cm  
För engångsbruk.  
Art nr: SM-TB-L-TP  
15 st per kartong