



High Performance Hemoclip

REMOVABLE

Meditalia®

Meditalia®



Sistema di rotazione dedicato
Dedicated rotation system

Sistema di rotazione dedicato mediante l'utilizzo del duodenoscopia a visione laterale.

Dedicated rotation system through the use of lateral vision duodenoscope.

CLIP ENDOSCOPICA REMOVIBILE REMOVABLE ENDOSCOPIC HEMOCLIP




Aperture da 9-11 -13- 11/16 - 16-20 mm con inserimento del codice colore

Opening span 9-11 -13- 11/16 - 16-20 mm with color code

Clip utilizzata per tamponare le emorragie nel tratto digerente durante procedure endoscopiche. È l'unica clip certificata **CE** per l'utilizzo con il duodenoscopia per il trattamento di perforazioni, emorragie digestive e proflassi per sanguinamento tardivo post resezione

*Clip used to clamp bleeding in the digestive tract during endoscopic procedures. It is the only **CE** certified clip for use with duodenoscope for the treatment of perforations, digestive hemorrhages and late post resection bleeding prophylaxis*

Products info

References	Opening span	Working length	Claw angle	Morphology	Channel	Sheath
MED-203-CLP	11 mm	230 cm	90°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-204-CLP	11 mm	230 cm	135°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-205-CLP	9 mm	230 cm	90°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-206-CLP	9 mm	230 cm	135°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-207-CLP	5 mm	230 cm	90°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-212-CLP	13 mm	230 cm	135°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-410-CLP	16 mm	230 cm	135°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-413-CLP	16 mm	270 cm	135°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-411-CLP	11 mm	270 cm	90°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
 MED-420-CLP	11-16 mm (Multiple)	230 cm	135°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻
MED-215-CLP	20 mm	230 cm	135°	rotatable	2,8 mm	PTFE ↻




Meditalia® Competitors

Le barre più avvolgenti, della nuova clip SICURA Plus di produzione MEDITALIA, aumentano in modo efficace il grado di pressione sulle superfici di presa per una migliore chiusura e stabilità. La minore distanza tra loro, consente, una presa di tessuto maggiore che garantisce migliori performance.

The more wrapping bars of the new MEDITALIA SICURA Plus clip effectively increases the degree of pressure on the gripping surfaces for better closure and stability. The shorter distance between them allows for greater tissue grip and guarantees better performance.

La clip ELEVEN Plus della nuova linea SICURA Plus è l'unica ad avere una doppia apertura in un unico device. La clip da 11 mm, con lunghezza barre da 6 mm, tramite il controllo del manpolo apre fino a 16 mm. Ciò la rende più manovrabile, maggiormente visibile e particolarmente utile in alcune aree in cui è presente uno spazio limitato: nell'esofago, nel sigma o nel ginocchio duodenale.

The ELEVEN Plus clip of the new safe plus line is the only one to have a double opening in a single device. The 11 mm clip, with 6 mm bar length, opens up to 16 mm by means of the handpiece control. This makes the device more maneuverable more visible and even more usefull in some areas where there is limited space: in the esophagus, sigma or duodenal knee.

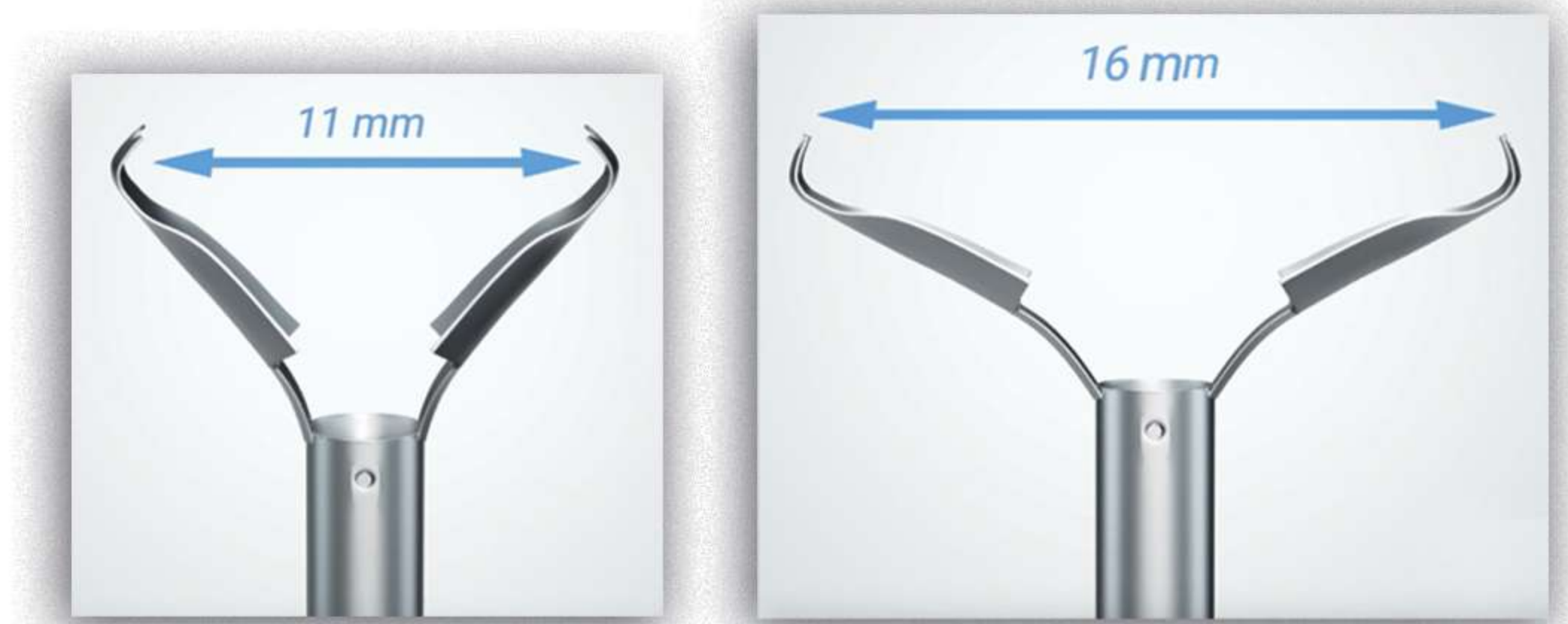

Esclusiva clip da 11 mm com apertura controllata a 16 mm
Exclusive 11mm clip with controlled opening at 16 mm

Posizionamento ansa



Azionamento sistema di sgancio




Clip rimossa



La nuova clip SICURA è l'unica rimovibile dopo il rilascio, attraverso l'inserimento di un ansa monofilamento o plurifilamento di diametro sottile all'interno di un meccanismo di sgancio dedicato. La possibilità di rimozione è indicata in caso di rilascio insoddisfacente e con la tecnica della trazione.

The new SICURA clip is the only one that can be removed after release, by inserting a monofilament or multi filament loop with a thin diameter inside a dedicated release mechanism. The possibility of removal is indicated in case of unsatisfactory release and with the traction technique.

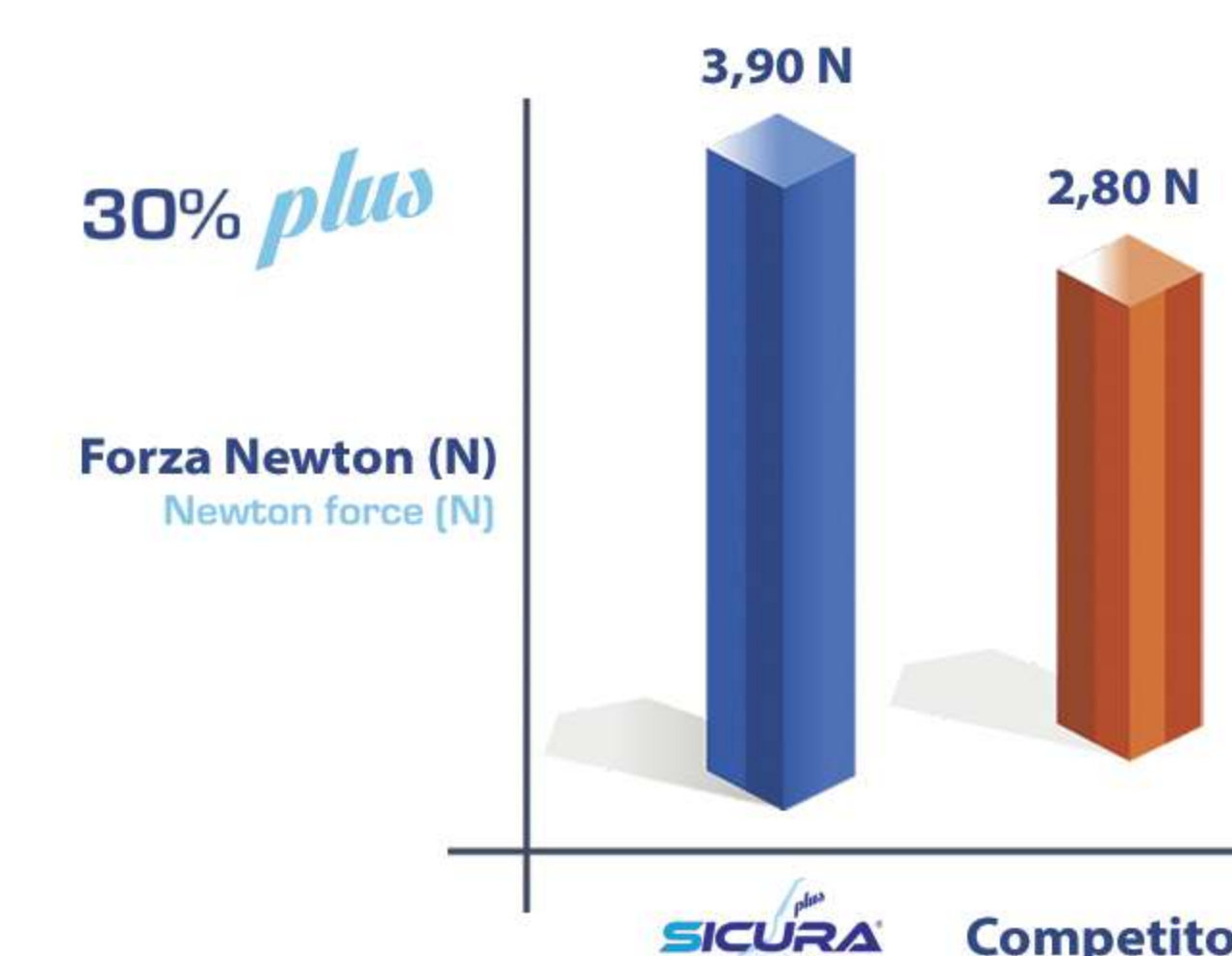

• Più sicura per l'emostasi
Safer for hemostasis